

## Kullanım amacı

Bu tıbbi cihaz, farklı nedenlere bağlı diyare vakalarında karın gerginliği ve sık dışkılama gibi semptomların kontrolü ve azaltılması için özel olarak formüle edilmiş olup, bağırsak çeperinin fizyolojik işlevini geri getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu tıbbi cihaz bağırsak mukozasını koruyan bir film oluşturarak etki eder ve diyare ataklarının sıklıklarını ve sürelerini azaltır.

## Ticari Sunum

Pediyatrik kullanım için toz içeren sekiz şaşe.  
Yetişkinlerin kullanımı için sekiz kapsül içeren blister ambalaj.

## Bileşimi

Toz: Ksiloglukan, Jeloz, Maltodekstrinler, Sitrik asit, Sodyum Klorür, Sukraloz ve Çilek ve Vanilya Aroması.

Kapsül: Ksiloglukan, Jeloz, Mısır Nişastası, Magnezyum Stearat (Bitkisel kaynaklı), Silika.

## Kullanım talimatları

Toz: Bir şaşenin içindekileri yarım bardak suda eritin. Ayrıca az miktarda meyve suyu ilave edilebilir. İyice karıştırın ve hemen tatbik edin.

Kapsül: Kapsülü bir sıvı ile yutun.

## Dozaj

3 yaşın altındaki çocuklar: Her 8 saatte bir şaşe.

3-14 yaş arası çocuklar: 6-8 saatte bir 1-2 şaşe.

Yetişkinler ve 14 yaşından büyük çocuklar: 6-8 saatte bir 1-2 kapsül.

## Uyarılar

- Ürünü kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak gerekmez. Bununla birlikte, şiddetli veya sürekli semptomlar görülmesi halinde veya teşhisten şüphelenildiğinde hekiminize danışmanız önerilir.

- 3 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda diyare vakalarında, özellikle başka belirtiler görüldüğünde, bir hekime danışmanız önerilir.

- Bu tıbbi cihaz farmakolojik bir tedavi değildir. Eğer bir hekim tarafından böyle bir tedavi önerilmişse, cihaz bununla eşzamanlı olarak uygulanabilir.

- Bol miktarda sıvı tüketimi ve diyare tedavisinde kabul edilen diyet önlemlerinin alınması önerilir.

- Bilinen hiçbir yan etkisi olmamakla birlikte, bir hekim tarafından aksi belirtilmediği sürece ürünün hamilelik veya emzirme döneminde kullanılmaması önerilir.

- Ürünü ambalaj üzerine basılan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

- Blister veya şaşeler açılmış veya hasar görmüşse, ürünü kullanmayın.

- Bu tıbbi cihaz özel saklama koşulları gerektirmez. Dondurmayın.

- Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

## Kontrendikasyonlar

Tıbbi cihaz, ksiloglukan veya ürünün bileşiminde listelenen diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.