

Xailin Night

Lubrikant Göz Pomadı 5 g

PREZERVANSIZ

Kullanım Kılavuzu

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı'nı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı Nedir?

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı, göz kuruluğu hissinin gece boyunca rahatlaması için çok-dozluk prezervansız, beyaz, saydam, yabancı maddelerden arınmış yumuşak bir göz pomadıdır. Ambalaj 5 g steril göz pomadı içerir.

Bileşimi:

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı, %57,3 beyaz yumuşak parafin, %42,5 beyaz mineral yağ ve %0,2 lanolin alkol içerir; göz yüzeyinde saydam, kayganlaştırıcı (lubrikant) ve nem tutucu bir film oluşturur.

Ne zaman kullanılmalıdır?

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı, nem kaybına karşı bariyer görevi yaparak geceleri kuru göz hissini yatıştırıcı güçlü bir rahatlama sağlar. İdeal kullanım zamanı yatmadan öncesidir.

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı ağrı, iritasyon veya kumlanma hissi gibi göz kuruluğu belirtilerinde yatıştırıcı rahatlama sağlar. Göz kuruluğu semptomları, normal gözyaşı kalitesinin bozukluğundan ya da çok az miktarda üretilmesine bağlı olarak gözün yeterince nemli tutulmadığı bir dizi farklı nedenlerle oluşabilen oküler yüzey bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı kullanımına dair herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılabilir.

Nasıl kullanılır?

Aşağıda belirtildiği gibi; gerektiğinde her göze yaklaşık 1 cm pomadı ince bir çizgi şeklinde uygulayın:

Yeni bir Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı tüpünü açmadan önce tüpün kapağı üzerindeki güvenlik halkasının sağlam olduğunu kontrol edin.

1. Mührü kırmak için kapağı saat yönünün tersine döndürünüz
2. Kullanmadan önce ellerinizi yıkayın ve kurulayın
3. Dış kapağı çıkarınız
4. Eğer kontakt lens kullanıyorsanız lensi çıkarınız
5. Başınızı geriye doğru eğin ve yukarı bakın
6. Göz kapağınız ile gözünüz arasında küçük bir cep oluşturmak için alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekiniz
7. Tüpü diğer elinizin başparmağı ve orta parmağı arasında tutun, sonra tüpü göze yakın olarak aşağıya doğru çevirin ve tüpün ağzını göze değdirmemeye çalışın
8. Yaklaşık 1 cm ince bir pomadın çıkması için tüpe yeteri kadar basınç uygulayınız veya doktorunuz ya da eczacınızın söylediği şekilde uygulayınız
9. Gözünüzü birkaç kez kırınız

10. Pomadı gözünüze denk getiremezseniz, bir kez daha pomad uygulayın.
11. Gözkapağı çevresinde kalan fazla Xailin Night pomadı bir mendille dikkatli bir şekilde silerek uzaklaştırın
12. Gerekiyorsa bu işlemi diğer göz için de tekrarlayınız
13. Uygulama ucunu göz ya da parmaklarınız dahil hiçbir şeye değdirmemeye çalışın ve tüpün dış kapağını kapatın
14. Herhangi bir diğer oftalmik ilacı uygulamadan önce 30 dakika bekleyiniz

Xailin Night Lubrikant Göz Pomadını nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz veya gözdeki sorununuz devam ediyorsa doktorunuza ya da eczacınıza başvurunuz.

Önlemler ve uyarılar:

- Tüpün kapağı üzerindeki güvenlik halkası kırılmışsa kullanmayınız
- Lanolin alkollere veya içerdiği maddelerden herhangi birine alerjikseniz kullanmayınız
- Kontakt lens ile kullanmayınız
- Xailin Night Lubrikant Göz Pomadını diğer kişilerle paylaşmayınız
- Xailin Night Lubrikant Göz Pomadı geçici hafif yanma hissine ve/veya uygulama sonrası görme bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine kullanmadan önce görmeniz netleşinceye kadar bekleyiniz
- Dış kutu ambalajı veya tüpün kıvrımı üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız
- 1°C ile 25°C arasında saklayınız
- İlk açılışından 28 gün sonra atınız
- Çocukların ulaşabileceği ve görebileceği yerlerden uzak tutunuz
- Bu ürün sadece oftalmik kullanım içindir ve haricen kullanılır, yutmayınız
- Kullanılmış olan tüpü yerel mevzuata uygun olarak imha ediniz



Nicox Pharma tarafından dağıtılmaktadır, CS10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Fransa - nicoxpharma@nicox.com



Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, İngiltere
1°C ile 25°C arasında saklayınız

İlk açılışından 28 gün sonra atınız



Dikkat, bakınız kullanma kılavuzu



Kullanım Kılavuzuna başvurunuz

STERİL	A	Steril, aseptik işleme teknikleri kullanılarak
--------	---	--

İthalatçı:

Liba Laboratuvarları A.Ş. Otağtepe Cad. No:5. 34810 Kavacık İstanbul

Üretici:

Medicom Healthcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, İngiltere

Xailin Nicox'un ticari markasıdır.

Metnin son revizyonu: Ekim-2013

