

Kullanım Kılavuzu

Bepanthol®Anti-Scar Jel Masaj Topu İle

Yara cildin derin tabakalarını (dermis) etkilediğinde yara izi oluşma riski vardır ancak doğru destekle son görünüşü mümkün olan en iyi hale getirilebilir.

BepantholAnti-Scar Jel'in yenilikçi formülü, ameliyat ya da yaralanmalardan sonra oluşabilecek yara izlerini önlemeye ve gidermeye destek olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

BepantholAnti-Scar Jel iki şekilde kullanılabilir:

A) Bir aydan kısa süredir kapalı olan yaralarda tek başına.

B) Bir aydan uzun süredir kapalı olan yaralarda beraberindeki masaj topuyla birlikte.

BepantholAnti-Scar Jel nedir ve ne zaman kullanılmalıdır?

BepantholAnti-Scar Jel, kapanan yara üzerinde kızarıklık ve kabarıklık yara izi (hipertrofik skar) oluşumunu önlemeye yardımcı olmak amacıyla yalnızca yara kapandıktan sonra kullanılan silikon içinde su emülsiyonudur. BepantholAnti-Scar Jel var olan yara izlerinin de pürüzsüzleşmesine, yumuşamasına ve düzleşmesine yardımcı olur ve yara izlerinde sıklıkla görülen kızarıklık, gerginlik ve kaşıntıyı azaltır.

Kapanan yaranın bakımı neden bu kadar önemlidir?

Bir yara kapandığında iyileşme sürecinin bittiği tek yer yüzeylemdir!


Aslında yara izleri için en önemli evre olan yeniden yapılanma safhası başlamaktadır ve bu safhanın tamamlanması iki yılı bulabilir.

Bu yeniden yapılanma evresinde, yeni oluşan cilt içindeki kolajen cildi kuvvetlendirmek için yeniden düzenlenir. Onarım sırasında meydana gelen kolajen fazlasının ortadan kaldırılması da yine bu evrede olur.

Fazla kolajenin o bölgede kalması ya da büyük miktarda kolajen üretiminin devam etmesi yoğun yara izi dokusu ve hipertrofik skarlara yol açar. Bu da olması gerekenden daha büyük ya da daha göze çarpan bir yara izine neden olur. Yapılan son araştırmalar atılacak bazı basit adımların yeniden biçimlenme evresini destekleyerek yoğun yara izi oluşumu riskini azaltabileceğini göstermiştir.

BepantholAnti-Scar Jel nasıl bir etkiyle yoğun yara izi görünümünü azaltmaya yardımcı olur?

Yoğun, kırmızı ve kabarıklık yara izi oluşumunun başlıca nedeni, yeniden yapılanma safhası sırasında inflamasyonun çok yüksek düzeyde devam etmesidir. Yeni oluşan cildin su tutması sağlanırsa hem inflamasyon hem de kolajen birikimi azalır ve bu da daha küçük yara izi anlamına gelir (referans olarak bkz. şekil 1).

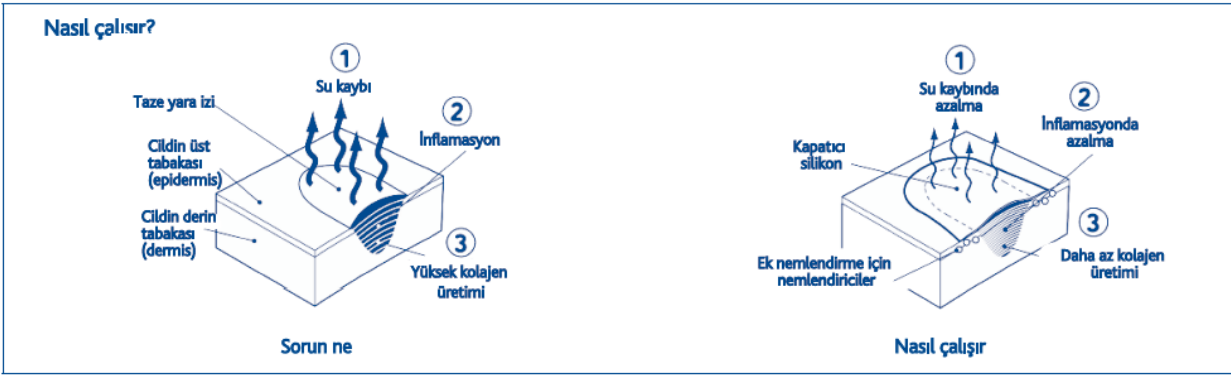

Şekil 1: BepantholAnti-Scar Jel etki mekanizması

BepantholAnti-Scar Jel yara izi oluşumu ve giderilmesiyle ilgili son bilimsel önerilerin ışığında geliştirilmiş olup kızarıklık ve kabarıklık yara izlerini azaltmaya üç şekilde yardımcı olmaktadır:

- Silikon, yara izini örten bir film tabakası oluşturarak yeni oluşan cildi kurumaktan korur ve böylelikle nem dengesini muhafaza eder.
- Pantenol gibi nemlendiriciler suyu ciltte tutarak bu etkiye yardımcı olur.
- Masaj topu eski yara izlerindeki kolajen liflerini kırmaya yardımcı olur.

BepantholAnti-Scar Jel eski yara izlerinde de aynı şekilde görev yapar:

Yeterli nemlendirme sağlayarak inflamasyonu ve kolajen oluşumunu azaltır. Daha oturmuş bu eski yara izlerinde BepantholAnti-Scar Jel yanında bulunan masaj topu da bu etkiyi destekler. Bu masaj topu, yara izi içindeki kolajen liflerinin kırılmasına yardımcı olur. Masaj topunun kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bölüme bakınız.

BepantholAnti-Scar Jel eski yara izlerinin pürüzsüzleşmesine, yumuşamasına ve düzleşmesine yardımcı olur. Yara izlerinde sıklıkla görülen kızarıklık, gerginlik ve kaşıntıyı azaltır.

BepantholAnti-Scar Jel'in diğer özellikleri şöyledir:

- Koruyucu içermez.
- Parfüm içermez.
- Klinik olarak test edilmiştir.

BepantholAnti-Scar Jel nasıl kullanılır?

A) Bir aydan kısa süredir kapalı olan yaralar:

BepantholAnti-Scar Jel yalnızca yara tamamen kapandıktan sonra kullanılabilir. Bir aydan kısa süredir kapalı olan yaralarda aşağıdaki şekilde olmak üzere yalnızca jel kullanılır:

Yara izinin büyüklüğüne göre yeterli miktarda BepantholAnti-Scar Jel'i parmağınızla ince bir tabaka halinde yara izinin üzerine sürün ve birkaç dakika bekleyin (örneğin giyinmeden önce).

Kurumamış BepantholAnti-Scar Jel kalıntıları giysiler üzerinde iz bırakabilir.

BepantholAnti-Scar Jel günde iki kez uygulanır (örneğin sabah ve akşam).

İki uygulama arasında banyo yapılır/duş alınır ya da yoğun spor aktivitesi yapılırsa tekrar uygulanır.

BepantholAnti-Scar Jel en az 2 ay boyunca kullanılmalıdır.


BepantholAnti-Scar Jel erişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilir.

B) Bir aydan uzun süredir kapalı olan yaralar

BepantholAnti-Scar Jel'in yanında bir masaj topu bulunmaktadır.

Bu masaj topu yalnızca bir aydan uzun süredir kapalı olan yaralardaki izler üzerinde kullanıma yöneliktir.

Masaj topunu, bir aydan uzun süredir kapalı olan yaralarda şekil 2’de gösterildiği ve aşağıda anlatıldığı şekilde BepantholAnti-Scar Jel’i uygulanmadan önce kullanınız.

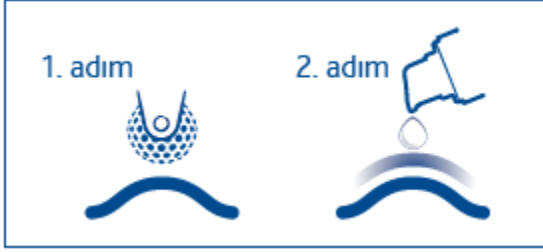

Şekil 2: Bir aydan uzun süredir kapalı olan yaralarda masaj topunun BepantholAnti-Scar Jel ile birlikte kullanımı

Masaj topunu yukarıda Bölüm A’da belirtildiği gibi, Bepanthol Anti-Scar Jel’i uygulamadan önce yara izi üzerinde birkaç kez yuvarlayarak çok hafif basınçla ve nazıkçe masaj yapmak için kullanınız. Bu masaj kolajen liflerinin kırılmasına yardımcı olur.

BepantholAnti-Scar Jel ne zaman kullanılmaz?

Açık yaralar ve mukoza üzerinde kullanmayınız.

Göze yakın bölgelerde kullanmayınız.

İçeriğindeki herhangi bir bileşene karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

Yalnızca haricen kullanıma yöneliktir.

BepantholAnti-Scar Jel kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?

Herhangi bir cilt reaksiyonu görürseniz kullanmayı bırakınız ve gerekirse hekiminize başvurunuz.

Kazara göze, açık yaralara ya da mukozaya gelirse bol suyla yıkayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Masaj topu kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?

⚠ Yeni oluşan deri hala çok narin olduğu ve yaranın yeniden açılma riski bulunduğu için masaj topunu yeni kapanan yaralar (bir aydan kısa süredir kapalı olan) üzerinde kullanmayınız.

Uygulama rahatsızlık ya da ağrı veriyorsa kullanmayı kesiniz.

Masaj topunu temizlemek için nemli ya da kuru bir mendille güzelce silebilirsiniz. Topu doğrudan suyun altında yıkamayınız.

Masaj topunu şişeden ayırmayınız.

BepantholAnti-Scar Jel ve masaj topunu kullanmanın herhangi bir yan etkisi olabilir mi?

Ürün tavsiye edildiği gibi kullanılırsa istenmeyen bir yan etki beklenmemektedir. Ancak tüm dermatolojik ürünlerde olduğu gibi bağımsız cilt reaksiyonu vakaları görülebilir.

BepantholAnti-Scar Jel içeriğinde neler vardır?

İÇERİK:

Dimetikon, Dimetikon Çapraz Polimer, Su, Pentilen Glikol, Pantenol, Bis-İzobütil PEG/PPG 10/7 Dimetikon Kopolimer, Dimetikonol, Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Sitrik Asit.

BepantholAnti-Scar Jel nereden alınır?

BepantholAnti-Scar Jel'i eczanelerden temin edebilirsiniz.

Kutunun içeriği nedir?

Kutuda şunlar bulunur:

– BepantholAnti-Scar Jel



– Jel şişesine tutturulmuş masaj topu



Üretici:

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Strasse
84CH-4052 Basel
İsviçre



İthalatçı firma:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye-İstanbul
Tel: 0216 528 36 00
Fax: 0216 645 39 50

Ambalaj üzerinde yer alan semboller



Lot Numarası



Son kullanma
tarihi



Kullanım kılavuzunu
okuyunuz



**Özel dikkat, kullanım
kılavuzunu okuyunuz**

Revizyon no: 08/2016