



## BUDESONİD İNHALER KAPSÜL KULLANIM TALİMATI\*

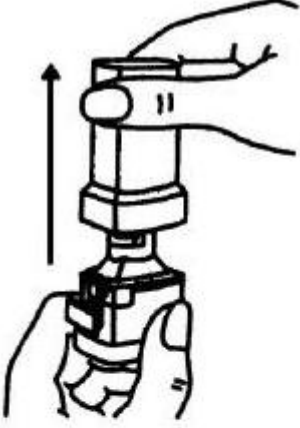

1- Kapağı çekerek çıkarınız




2-inhalatörün alt kısmın sıkıca tutunuz ve ağız parçasını ok istikametinde döndürerek açınız.

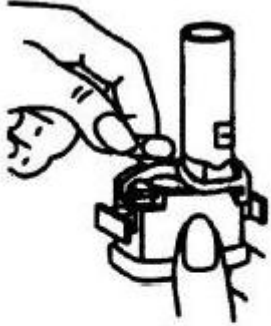

3-Blisterden bir inhale kapsül alınız.inhale kapsülü inhale törün alt bölümünde bulunan kapsül şeklindeki bölüme yerleştiriniz.inhale kapsülü kullanımdan hemen önce blisterden çıkartmanız önemlidir.



4- Ağız parçasını kapalı konuma gelecek şekilde döndürünüz.

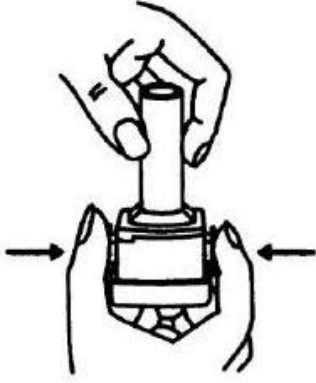

5-inhalatörü dik tutarak düğmelere **YALNIZCA BİR SEFER BASINIZ**. Düğmeleri bırakınız. Lütfen dikkat: Bu işlemi yaparken inhaler kapsül parçalanabilir ve küçük jelatin parçaları ağızınıza veya boğazınıza gelebilir. Jelatin yenilebilir bir maddedir ve dolayısıyla zararlı değildir. Parçalanma olasılığını en aza indirmek için inhaler kapsülü birden fazla sefer delmeyiniz ve inhaler kapsülü ambalajından kullanımdan **hemen önce** çıkartınız. (bkz. 3. basamak)



6- Nefesinizi tam olarak veriniz



7- Ağız parçasını ağızınıza sokunuz ve başınızı hafifçe geriye yaslayınız. Dudaklarınızı ağız parçasının etrafında kapatınız ve olabildiğince derin, hızlı ve sürekli bir nefes alınız. Toz dağılırken inhaler kapsülün bölmesinde dönmesinden kaynaklanan bir vızıltı sesi duyacaksınız. Vızıltı sesini duymadıysanız inhaler kapsül, kapsül şeklindeki bölümde sıkışmış olabilir; bu durumda inhalatörü açınız ve inhaler kapsülü kapsül bölümünde oynatarak gevşetiniz.inhaler kapsülü gevşetmek için düğmelere birden fazla **BASMAYINIZ**.

8- Vızıltı sesini duyduğunuzda inhalatörü ağızınızdan çıkartınız ve nefesinizi rahatsız olmadan olabildiğince uzun süre tutunuz. Sonra nefesinizi veriniz.inhaler kapsülde hala toz kalıp kalmadığına bakmak için inhaleri açınız.inhaler kapsülde toz kalmışsa, 6-8 arasındaki basamakları tekrar ediniz.

9- Kullandıktan sonra inhalatörü açınız, boş inhaler kapsülü çıkartınız, ağız parçasını kapatınız ve kapağı tekrar takınız.

### **İnhalatörün Temizlenmesi**

Toz atıklarının temizlenmesi için ağız parçasını ve kapsül bölümünü **KURU** bir bez ile temizleyiniz.